

Guide de démarrage

PREMIERS PAS




Se créer un compte Curapy


Afin de profiter des jeux disponibles, vous devez avoir un compte Curapy.

- Rendez-vous sur la page [Tarifs et Inscription](#) <http://www.curapy.com/tarifs-inscription/>
- Cliquez sur [JE CRÉE MON COMPTE PARTICULIER](#) OU [JE CRÉE MON COMPTE PRO](#)
- Remplissez les informations demandées
- Confirmez votre adresse mail et obtenez votre login et mot de passe
- Vous pouvez alors vous connecter à votre espace personnel Curapy via l'adresse <https://services.curapy.com>

Vérifier la version Windows

Vérifiez que votre ordinateur est bien équipé de Windows 8.1 ou Windows 10.


1. Appuyez sur la Touche  et tapez  Panneau de configuration
Application de bureau
2. Dans le Panneau de configuration, cliquez sur Système et sécurité ou sur  **Système**
3. Au niveau du cadre jaune, vous retrouvez la version Windows installée sur votre ordinateur

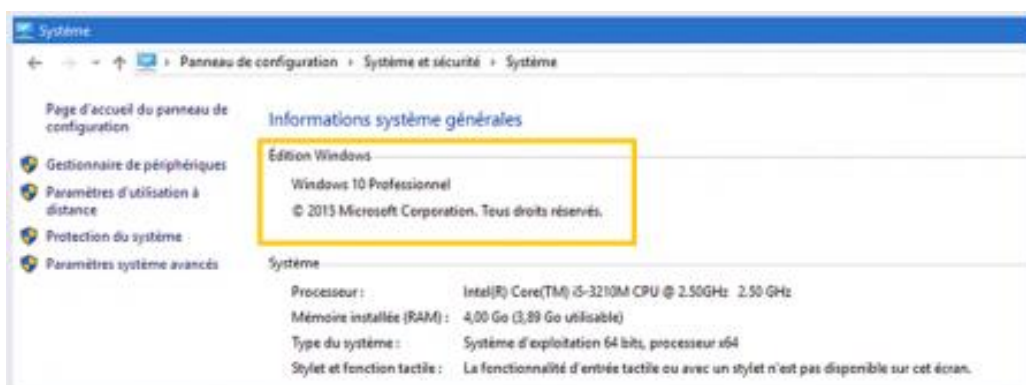

Installer le Gestionnaire de Jeux Curapy

Le **Gestionnaire de Jeux Curapy** est indispensable pour lancer les jeux vidéo thérapeutiques et Serious Games Santé.

1. Sur votre espace personnel, cliquez sur [Télécharger le gestionnaire de jeux Curapy](#) en haut à gauche.
2. Puis cliquez sur [Télécharger](#) et vous serez guidé
3. Une fois installée, lancez l'application grâce au raccourci sur votre bureau.

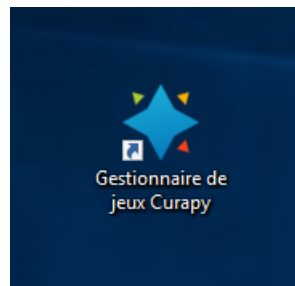

Matériel nécessaire pour chaque jeu

EHPAD Panic - CINACity

- Un ordinateur Windows 8.1 ou 10
- Une souris
- Un clavier

X-TORP - TOAP Run - Voracy Fish :

- Un ordinateur Windows 8.1 ou 10 (processeur 64 bits) + USB 3 et HDMI
- Un écran de télévision pour davantage de confort
- Un câble HDMI pour brancher l'écran à l'ordinateur
- Un capteur Kinect pour Xbox One
- Un adaptateur Kinect pour Xbox One S et PC Windows

INSTALLER LE MATERIEL

Préparer le matériel

Pour profiter pleinement des jeux vidéo thérapeutiques de Curapy.com vous devez avoir :

- Un ordinateur sous **Windows 8.1 ou 10** + USB 3 et **HDMI**
- Un **écran de télévision** pour davantage de confort
- Un **câble HDMI** pour brancher l'écran TV à l'ordinateur
- Un **capteur Kinect pour Xbox One**




- Un **adaptateur Kinect** pour Xbox One S et PC Windows




Nb : Certains jeux (Serious Games et Jeux d'entraînement) ne nécessitent pas l'ensemble de ce matériel. Reportez-vous au paragraphe « Matériel nécessaire pour chaque jeu ».

Brancher l'ordinateur sur une télévision

Pour profiter de la qualité graphique des jeux, nous vous conseillons de relier votre ordinateur à votre télévision.


1. Reliez votre ordinateur à votre écran de télévision à l'aide d'**un câble HDMI**
2. Maintenez la touche  enfoncée et appuyez sur la touche « **P** » de votre clavier
3. Dans la barre latérale qui s'ouvre, choisissez **Deuxième écran uniquement**

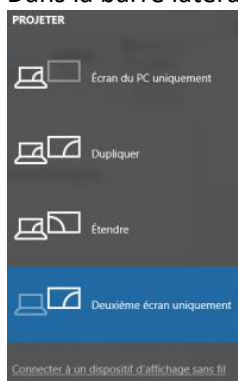

Brancher l'Adaptateur et la Kinect

Le Capteur Kinect pour Xbox One et Adaptateur Kinect pour Xbox One S et PC Windows sont indispensables pour utiliser les jeux vidéo thérapeutiques qui sont basés sur la reconnaissance de mouvement. Utilisez **l'Adaptateur Kinect pour Windows** pour connecter votre capteur Xbox One à votre ordinateur.


1. Reliez les embouts de l'Adaptateur

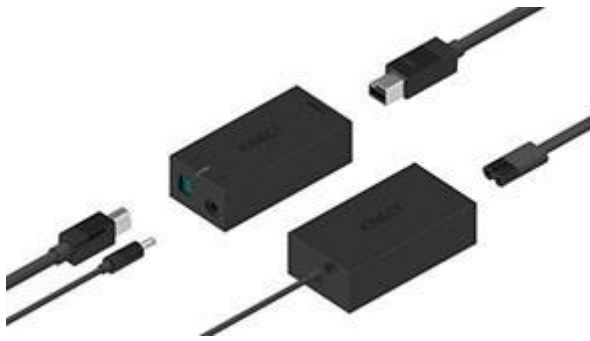

2. Branchez ensuite l'Adaptateur à la Kinect



3. Branchez le tout grâce à l'embout bleu directement sur l'un des ports USB 3 de votre ordinateur.

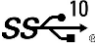
Vous reconnaitrez facilement le port USB 3 à sa couleur bleu ou à son sigle 

4. Une fois le capteur connecté à l'ordinateur, Windows installe automatiquement le pilote Kinect.


Si ce n'est pas le cas, téléchargez le pilote « **Kinect for Windows Runtime 2.0** » <http://bit.ly/kinect-drivers> sur le site de Microsoft.

Vérifier la compatibilité des ports USB et du matériel

1. Téléchargez l'application « **Kinect V2 Configuration Verifier** » (<http://bit.ly/kinect-verifier>) et installez-la

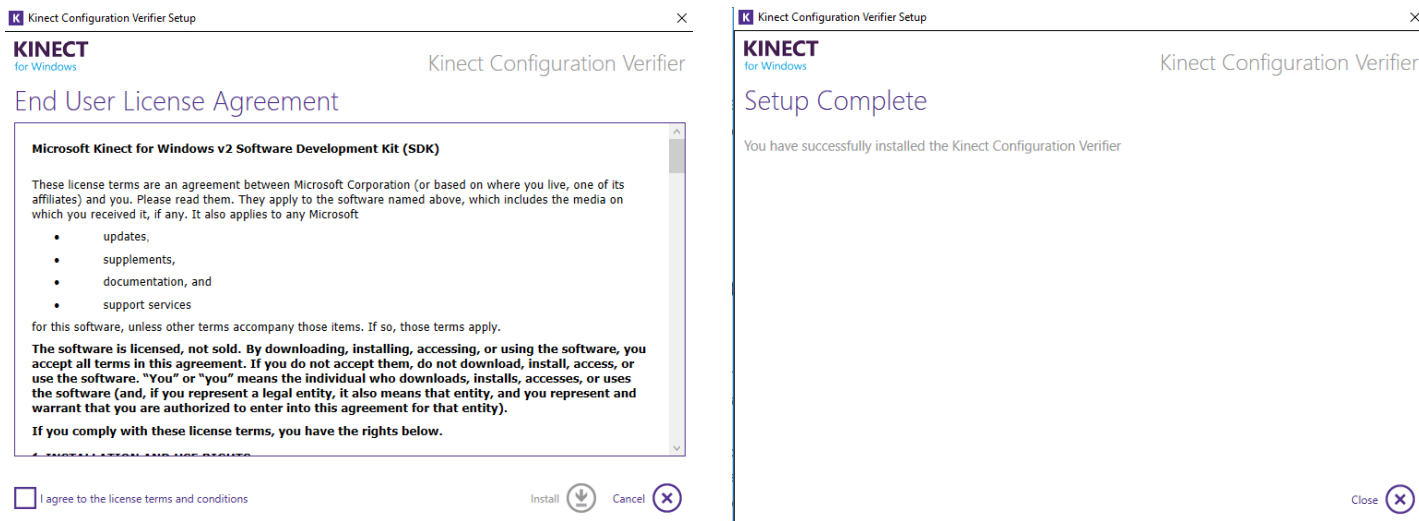


2. Lancez l'application **Kinect Configuration Verifier** en tapant dans la barre de recherche Windows

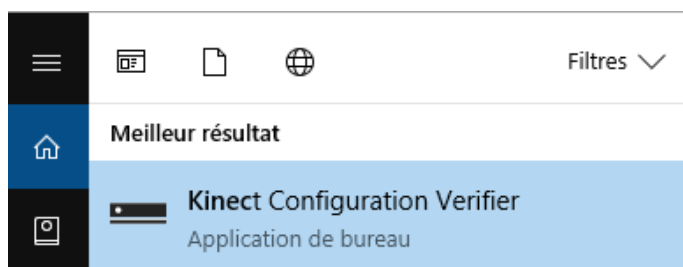

3. Si une des icônes est **rouge**, c'est que votre matériel n'est pas compatible. Vous ne pouvez donc pas accéder aux Jeux vidéo thérapeutiques. Cependant vous pouvez accéder aux Serious Games Santé et Jeux d'entraînement qui eux, se jouent à la souris et au clavier.


Nb : s'il s'agit de l'icône  **Kinect Connected** il est probable que vous l'ayez branché sur un mauvais port USB.

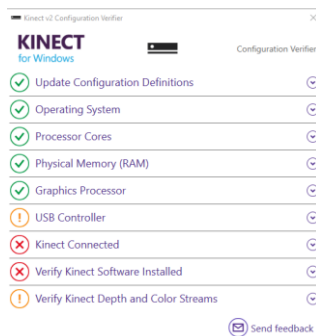


LANCER UN JEU

Lancer un jeu via le Gestionnaire de Jeux Curapy

1. Cliquez sur le logo Curapy sur le bureau.

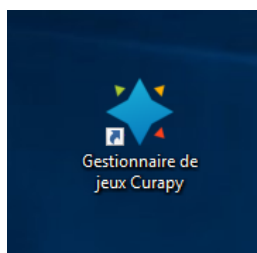

2. Saisissez vos **identifiant** et **mot de passe** envoyés à votre adresse e-mail au moment de l'inscription

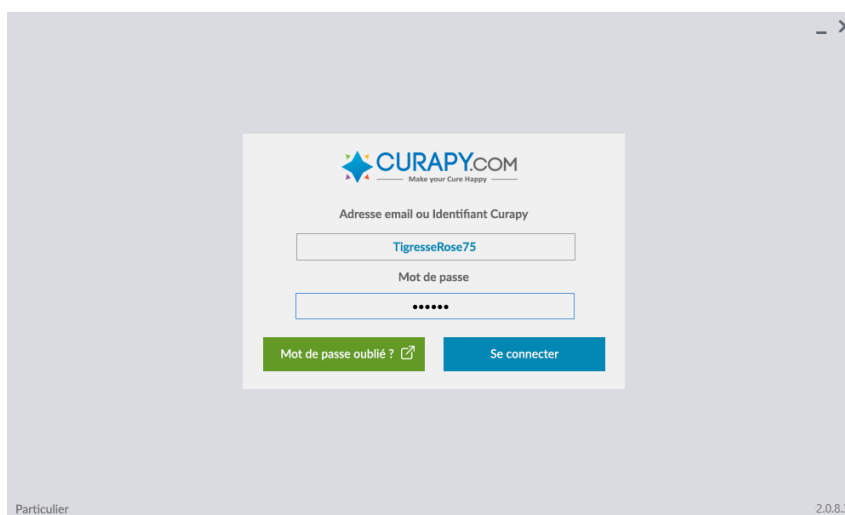





3. Si vous êtes un particulier vous accédez à cette interface. Cliquez sur **Choisir un jeu** pour lancer le jeu







3. Bis : Si vous êtes un professionnel de santé, vous accédez à cette interface. Cliquez sur **Ajouter un Patient** ou choisissez un Patient déjà enregistré



Avertissements et Précautions

-  Tous les meubles ou autres objets susceptibles de gêner l'utilisation de l'appareil ou de provoquer des chutes pendant les exercices doivent être retirés.
-  tenez-vous à une distance raisonnable de l'écran, ne laissez pas l'écran installé à proximité de sources lumineuses pouvant produire des reflets (ou utilisez des stores), choisissez une lumière naturelle apaisante qui réduit l'éblouissement et la fatigue visuelle et augmente le contraste et la clarté, ajustez la luminosité et le contraste de l'écran.
-  Toutes les précautions liées à l'utilisation des jeux vidéo doivent être prises en compte et en particulier les problèmes liés à l'addiction au jeu.
-  Entretien des installations électriques conformément aux règles de conception qui leur sont applicables lors de leur mise en service, superviser et entretenir les installations et équipements électriques, contrôler ou faire contrôler les installations électriques.

-  Assurez-vous qu'il y a suffisamment d'espace dans la pièce pour effectuer les exercices confortablement et sans interférence.
-  Assurez-vous que la session est optimisée en éliminant tous les éléments de distraction.
-  La dépendance au jeu vidéo peut se présenter comme un jeu compulsif, un isolement social, des sautes d'humeur, une imagination diminuée et une hyper-concentration sur les réalisations du jeu, à l'exclusion d'autres événements de la vie.
-  Ne jouez pas si vous êtes fatigué ou avez besoin de dormir.

Pour obtenir de l'assistance, veuillez
contacter notre service client

+800 4415 4415

customersupport@mindmaze.com



Fabricant:

MindMaze SA

Chemin de Roseneck 5

CH-1006 Lausanne, Suisse

EC REP

GENIOUS Healthcare SAS

26 Rue Cambaceres

75008 Paris, France



Pour plus d'informations, veuillez consulter le
manuel d'utilisation de Curapy.

Toutes les images sont non contractuelles, veuillez consulter le manuel du matériel pour plus d'informations.

L'utilisation de ce produit exige l'acceptation de l'accord de licence avec l'utilisateur final (EULA) de MindMaze.

Curapy est une marque déposée appartenant à MindMaze Group SA.

Copyright© MindMaze Group SA 2021. Tous droits réservés.

